

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin, votre ophtalmologiste ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

BAUSCH + LOMB

Aqualarm® Intensive UD

Acide hyaluronique à 0,2 %

Composition :

0,2 % d'acide hyaluronique (sous forme d'hyaluronate de sodium), chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate disodique dodécahydraté, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté et eau pour injection.

Aqualarm® Intensive UD ne contient pas de conservateur.

Utilisation prévue :

Lubrification des yeux et humidification des lentilles de contact souples et rigides lorsque portées.

Quand utiliser Aqualarm® Intensive UD ?

Aqualarm® Intensive UD est indiqué pour les cas de sécheresse oculaire causée par des facteurs environnementaux extérieurs. Ces facteurs comprennent souvent l'utilisation intensive de l'ordinateur, la climatisation, un clignement des paupières insuffisant, la fumée de cigarette et le vent.

De plus, certains médicaments (comme les contraceptifs oraux, les antihistaminiques, les bêta-bloquants, les antispasmodiques et les diurétiques), certaines pathologies et les conservateurs présents dans certains collyres jouent un rôle important dans le développement de la sécheresse oculaire.

Aqualarm® Intensive UD hydrate les yeux et soulage les symptômes de la sécheresse oculaire tels que les irritations, la sensation de sécheresse ou la fatigue oculaire, la sensation de corps étranger ou le larmoiement des yeux. Compte-tenu des propriétés du produit, les personnes ayant une sécheresse oculaire chronique peuvent l'utiliser.


Fréquence et durée du traitement par Aqualarm® Intensive UD ?

Instiller une goutte de Aqualarm® Intensive UD dans l'œil lorsque vous en ressentez le besoin. Vous pouvez l'utiliser quotidiennement et aussi souvent que nécessaire. Il n'existe pas de limite de durée.

Jeter le récipient unidose après utilisation.

Comment utiliser Aqualarm® Intensive UD ?

1. Séparez délicatement un récipient unidose de la bandelette.

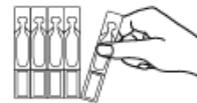

2. Tournez (ne tirez pas) le capuchon supérieur du récipient unidose.



3. Penchez légèrement la tête en arrière et tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec un doigt de votre main libre. Tenez le récipient unidose aussi verticalement que possible au-dessus de votre œil avec l'embout pointant vers le bas. Assurez-vous que l'embout ne touche pas votre œil pour prévenir toute blessure ou dommage possible. Ensuite, pressez doucement le récipient unidose pour appliquer une à deux gouttes.



Fermez ensuite votre œil et faites-le rouler lentement afin d'étaler de manière optimale la goutte sur la surface de votre œil.

Quand ne faut-il pas utiliser Aqualarm® Intensive UD?

N'utilisez pas ce produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants.

Informations importantes concernant l'utilisation de Aqualarm® Intensive UD :

- Des réactions d'hypersensibilité locale ont

été très rarement rapportées. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu. Si vous ressentez un inconfort ou une irritation persistante, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

- Information de sécurité pour les patients présentant de graves lésions de la cornée : Dans de très rares cas, des dépôts de phosphate de calcium sur la cornée ont été rapportés lors d'un traitement avec des produits contenant du phosphate à usage ophtalmique.
- Ne touchez pas la surface de l'œil avec l'embout du récipient unidose afin d'éviter toute blessure éventuelle.
- Attendez environ 15 minutes avant d'utiliser un autre produit ophtalmique.
- Ne pas réutiliser.
- La réutilisation du produit présente un risque potentiel d'infection pour l'utilisateur.
- Chaque unidose doit être jetée après utilisation.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas utiliser si l'emballage ou le récipient unidose est endommagé.
- Aqualarm® Intensive UD est conditionné dans de petites pièces en plastique pouvant être avalées par de jeunes enfants. Il y a un risque d'étouffement. Par conséquent, Aqualarm® Intensive UD doit être tenu hors de la portée des enfants.
- Aqualarm® Intensive UD peut être utilisé avec des lentilles de contact souples et rigides.
- Ce dispositif peut être utilisé par une personne profane n'ayant reçu aucune formation particulière.
- Selon les connaissances actuelles, ce produit peut être utilisé chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants.
- Si votre enfant souffre de sécheresse oculaire, consultez un médecin avant d'utiliser un produit d'hydratation oculaire.

Comment conserver Aqualarm® Intensive UD ?

À conserver à une température comprise entre + 1 °C et + 25 °C.

Élimination :

Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Tout incident grave dû à l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et à l'ANSM.


Quels conditionnements sont disponibles ?

Aqualarm® Intensive UD existe également en format flacon de 10 mL.

Explication des symboles



Stérilisé par des techniques de traitement aseptique et conditionné dans un système de barrière stérile simple.

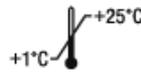

Stockage du dispositif médical à une température comprise entre +1 °C et +25 °C



Ne pas utiliser si l'emballage ou le récipient unidose est endommagé.



Lire les instructions d'utilisation



Date de péremption (AAAA-MM) – ne pas utiliser après la date de péremption



Numéro de lot



Medical Device / Dispositif Médical



Identifiant unique de dispositif
GTIN (01) identifiant de dispositif
EXP (17) date limite d'utilisation
(format : aammjj)
LOT (10) numéro de lot



Usage unique



Attention (consulter le mode d'emploi pour obtenir des informations de mise en garde importantes)



Date de fabrication



Fabricant :
Dr. Gerhard Mann chem.-
pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin - Allemagne



Évaluation européenne de la conformité des dispositifs médicaux
Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié

Information médicale : +33 (0)4 67 12 30 30

Date de publication :

Aqualarm Intensive UD, « I764EU-05 » ; date de révision (2023-05).

AQUALARM is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates



P1FR03 348E04-02.23 49070PB764/4-FR