

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre professionnel de santé, votre pharmacien, votre médecin, votre ophtalmologiste ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

Aqualarm[®]

Triple action

Composition :

0,24 % de sodium hyaluronate, carbomère, glycérol, composant lipidique, hydroxyde de sodium et eau pour injection.

Solution ophtalmique

Utilisation : Hydratation de l'œil.

Qu'est-ce que Aqualarm[®] Triple action ?

Aqualarm[®] Triple action est une solution ophtalmique non translucide contenant 0,24 % d'acide hyaluronique (sous forme de sodium hyaluronate), du carbomère, du glycérol, un composant lipidique, de l'hydroxyde de sodium et de l'eau pour injection.

Aqualarm[®] Triple action présente une très bonne tolérance, car il ne contient ni conservateur ni substance tampon. Grâce à son flacon sans conservateur, Aqualarm[®] Triple action s'utilise facilement et de façon sécurisée. Aqualarm[®] Triple action se conserve 6 mois après ouverture.

Dans quels cas utiliser Aqualarm[®] Triple action ?

Aqualarm[®] Triple action est une solution ophtalmique qui renforce les trois couches du film lacrymal pour améliorer l'hydratation de la surface oculaire en cas de sensation de sécheresse oculaire.

Quand utiliser Aqualarm[®] Triple action ?

Aqualarm[®] Triple action contient :

- un hydratant naturel, l'acide hyaluronique (sous forme de hyaluronate de sodium) que l'on retrouve dans les structures de l'œil humain sain et dans le film lacrymal,
- ainsi que deux hydratants additionnels : glycérol et carbomère,
- et grâce à son composant lipidique additionnel, Aqualarm[®] Triple action renforce les trois couches du film lacrymal : les phases lipidique, aqueuse et mucinique.

Aqualarm[®] Triple action est conçu pour rester sur la surface de l'œil, apporter une hydratation intense et immédiate et apporter un soulagement durable des symptômes.

Aqualarm[®] Triple action est adapté à toute personne souffrant d'une série de symptômes de sécheresse oculaire tels que la fatigue, le stress, les picotements, les sensations de brûlures et/ou les larmoiements oculaires.

Aqualarm[®] Triple action peut s'utiliser le jour et la nuit.

La sécheresse oculaire est causée par :

- Les facteurs externes, tels que l'utilisation intensive de l'ordinateur, la climatisation, le chauffage, la fumée de cigarette, le port de lentilles de contact ainsi que les éléments extérieurs comme le vent.
- D'autres facteurs, comme certains médicaments (la pilule contraceptive, les antihistaminiques, les bêta-bloquants, les antispasmodiques et les diurétiques) ou certaines maladies qui peuvent jouer un rôle dans le développement de la sécheresse oculaire.

Fréquence et durée du traitement par Aqualarm[®] Triple action ?


Instillez une goutte de Aqualarm[®] Triple action dans l'œil lorsque vous en ressentez le besoin.

Vous pouvez l'utiliser quotidiennement et aussi souvent que nécessaire. Il n'y a pas de limite dans la durée d'utilisation.

Comment utiliser Aqualarm[®] Triple action ?

Aqualarm[®] Triple action dispose d'un mécanisme de pompe breveté permettant de ne pas inclure d'agent conservateur. Il est possible que ce flacon soit différent de ceux que vous avez pu utiliser dans le passé.

Note Générale : Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Évitez tout contact entre l'embout du flacon et vos doigts ou la surface de votre œil afin d'éviter tout risque de contamination de la solution ou de blessure de l'œil.

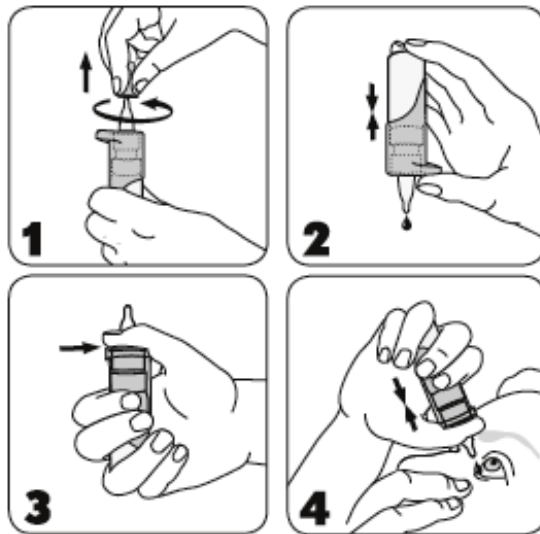

1. Avant chaque utilisation, enlevez le bouchon protecteur de l'embout du flacon par un mouvement rotatif.
2. **Attention ! Avant la première utilisation et si le flacon n'a pas été utilisé depuis un certain temps :** Retournez le flacon vers le bas, appuyez sur le mécanisme de pompe de façon répétée, jusqu'à ce qu'une goutte tombe.
3. Tenez le flacon comme indiqué : Placez votre pouce sur le support pouce ergonomique et deux autres doigts sur le bas du flacon.
4. Retournez le flacon et penchez légèrement la tête en arrière. Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon en position verticale au-dessus de l'œil et appuyez sur le mécanisme de pompe pour instiller une goutte dans votre œil.

Fermez l'œil et tournez-le doucement afin de diffuser la solution uniformément à la surface de votre œil.

5. Immédiatement après utilisation, secouez le flacon pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles et replacez le bouchon protecteur sur l'embout du flacon.

En raison de la conception du flacon, il reste un peu de solution dans le flacon. Cependant, on peut entièrement vider le flacon du volume de remplissage déclaré.

Quand ne faut-il pas utiliser Aqualarm® Triple action ?

N'utilisez pas ce produit en cas d'hypersensibilité à l'un de ses ingrédients.

Informations importantes concernant l'utilisation de Aqualarm® Triple action :

- Des réactions d'hypersensibilité locale ont été très rarement rapportées. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu. Si vous ressentez une gêne ou une irritation persistante, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin ou votre professionnel de la santé.
- Ce produit peut provoquer des troubles temporaires de la vision après l'instillation, ce qui entraîne un risque potentiel pour les conducteurs de véhicules ou les opérateurs de machines.
- Ne touchez pas la surface de l'œil avec l'embout du flacon afin d'éviter toute blessure de la surface de l'œil ou une contamination de la solution.
- Ne touchez pas l'embout du flacon avec les doigts afin d'éviter une contamination de la solution.
- Secouez le flacon après utilisation pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles.
- Une fois ouvert, ne partagez pas le flacon avec d'autres personnes.
- Une mauvaise utilisation du produit, contraire aux instructions d'utilisation, risque de faire glisser le flacon des mains et causer des blessures à l'œil.
- Enlevez les lentilles de contact avant utilisation.
- Attendez environ 15 minutes avant d'utiliser un autre produit ophtalmique ou avant de remettre les lentilles de contact.
- Jetez le dispositif médical 6 mois après ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne pas utiliser si l'emballage ou le flacon est endommagé.
- Aqualarm® Triple action contient de petites pièces en plastique pouvant être avalées par de jeunes enfants. Il existe un risque d'étouffement, c'est pourquoi Aqualarm® Triple action doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par une personne profane n'ayant reçu aucune formation particulière.
- Selon les connaissances actuelles, ce produit peut être utilisé chez les femmes enceintes, allaitantes et chez les enfants.
- Si votre enfant souffre de sécheresse oculaire, consultez un médecin avant d'utiliser un lubrifiant oculaire.

Comment conserver Aqualarm® Triple action?

À conserver à une température comprise entre + 1 °C et + 25 °C.

Le flacon est conçu de sorte que vous puissiez utiliser Aqualarm® Triple action pendant 6 mois après ouverture.

Élimination :


Le produit doit être éliminé conformément aux réglementations locales.

Tout incident grave dû à l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et à l'ANSM.

Quels conditionnements sont disponibles?

Aqualarm® Triple action est conditionné en flacon de 10 mL.

Explication des symboles

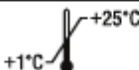	Méthode de stérilisation aseptique et conditionné dans un système de barrière stérile unique.
	Stockage du dispositif médical à une température comprise entre +1°C et +25°C
	Ne pas utiliser si l'emballage ou le flacon est endommagé
	Après la première utilisation, le dispositif médical se conserve 6 mois.
	Lire les instructions d'utilisation
	Attention : Consultez les instructions d'utilisation pour obtenir des informations importantes telles que des avertissements et des précautions d'emploi.
	Date de péremption (AAAA-MM) – ne pas utiliser après la date de péremption
	Numéro de lot
	Fabricant : Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165/173 13581 Berlin - Allemagne
	Dispositif Médical
	Identifiant unique de dispositif GTIN (01) identifiant de dispositif EXP (17) date limite d'utilisation (format : aammjj) LOT (10) numéro de lot
	Date de fabrication
	Évaluation européenne de la conformité des dispositifs médicaux Marquage CE avec numéro de l'organisme notifié

Information médicale : +33 (0)4 67 12 30 30



Date de publication :

Aqualarm Triple Action, « I999EU-06 »; date de révision (2023-06).

®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates

© 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates