

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, il contient des informations importantes pour l'utilisation de ce produit.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien, votre médecin, votre ophtalmologiste ou vous mettre en relation avec l'information médicale.

Aqualarm™ U.P.

Povidone 2%, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, acide borique et eau pour injection.

Utilisation : Hydrate et rafraîchit l'œil. Humidifie les lentilles de contact (souples et rigides).

Qu'est-ce que Aqualarm™ U.P.?

Aqualarm™ U.P. est une solution ophtalmique qui contient 2% de Povidone, du chlorure de sodium, de l'hydroxyde de sodium, de l'acide borique et de l'eau pour injection.

La formule est très bien tolérée car sans conservateur.

Grâce à son flacon innovant et sans conservateur, **Aqualarm™ U.P.** s'utilise facilement et de façon sécurisée.

Aqualarm™ U.P. se conserve 3 mois après ouverture.

Quelles sont les utilisations possibles d'Aqualarm™ U.P.?

Aqualarm™ U.P. hydrate, rafraîchit agréablement et apaise vos yeux en soulageant les symptômes liés à la sécheresse oculaire (sensation d'œil sec, de brûlure ou de fatigue oculaire).

Aqualarm™ U.P. convient pour l'humidification durant le port de lentilles de contact souples et rigides et améliore le confort du port de lentilles de contact durant toute la journée.

Quand devez-vous utiliser Aqualarm™ U.P.?

Aqualarm™ U.P., contenant de la povidone aux propriétés hydratantes, peut être le produit idéal pour toute personne souffrant des symptômes de sécheresse oculaire.

Ces symptômes peuvent être causés par le fait de regarder la télévision pendant une période prolongée, un travail sur écran soutenu, une exposition à l'air ambiant sec (chauffage, climatisation), la présence de conservateurs dans certains collyres.

Combien de fois et pendant combien de temps pouvez-vous utiliser Aqualarm™ U.P.?


Selon vos besoins, instillez 1-2 gouttes d'Aqualarm™ U.P. dans l'œil. Aqualarm™ U.P. peut être utilisé quotidiennement et aussi fréquemment que souhaité. Il n'y a pas de limitation de durée.

Comment utiliser Aqualarm™ U.P.?

Aqualarm™ U.P. dispose d'un mécanisme de pompe breveté permettant de ne pas inclure d'agent conservateur. Il est possible que ce flacon soit différent de ceux que vous avez pu utiliser dans le passé.

Note Générale : Lavez-vous les mains avant chaque utilisation. Évitez tout contact entre l'embout du flacon et vos doigts ou la surface de votre œil afin d'éviter tout risque de contamination de la solution ou de blessure.

1. Avant chaque utilisation, enlevez le bouchon protecteur de l'embout du flacon par un mouvement rotatif.

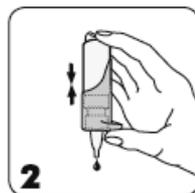

2. Attention ! Avant la première utilisation et si le flacon n'a pas été utilisé depuis un certain temps : Retournez le flacon vers le bas, appuyez sur le mécanisme de pompe de façon répétée, jusqu'à ce qu'une goutte tombe.

3. Tenez le flacon comme indiqué :

Placez votre pouce sur le support pouce ergonomique et deux autres doigts sur le bas du flacon.

4. Retournez le flacon et penchez légèrement la tête en arrière. Tirez doucement votre paupière inférieure vers le bas avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon en position verticale au-dessus de l'œil et appuyez sur le mécanisme de pompe pour instiller une goutte dans votre œil.

Fermez l'œil et tournez-le doucement afin de diffuser la solution uniformément à la surface de votre œil.

5. Immédiatement après utilisation, secouez le flacon pour éliminer les éventuelles gouttes résiduelles et remplacez le bouchon protecteur sur l'embout du flacon.

En raison de la conception du flacon, il reste un peu de solution dans le flacon. Cependant, on peut entièrement vider le flacon du volume de remplissage déclaré.

Quand ne faut-il pas utiliser Aqualarm™ U.P.?

N'utilisez pas Aqualarm™ U.P. en cas d'allergie à l'un de ses composants.

Informations importantes concernant l'utilisation de Aqualarm™ U.P.

- Des réactions d'hypersensibilité (comme des réactions allergiques) ont été très rarement rapportées. Dans ce cas, arrêtez le traitement. Si vous ressentez une gêne ou une irritation persistante, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.
- Ne pas toucher la surface de l'œil avec l'extrémité du flacon pour éviter toute blessure de la surface de l'œil ou toute contamination de la solution.
- Ne touchez pas l'embout du flacon avec vos doigts afin d'éviter toute contamination de la solution.
- Une fois ouvert, ne partagez pas le flacon avec quelqu'un d'autre.
- Une mauvaise utilisation du produit, contraire aux instructions d'utilisation, risque de faire glisser le flacon des mains et causer des blessures à l'œil.
- Attendre environ 15 minutes avant d'utiliser un autre produit pour les yeux.
- Jeter le dispositif médical 3 mois après ouverture.
- Ne pas utiliser Aqualarm™ U.P. après la date de péremption.
- N'utilisez pas Aqualarm™ U.P. si le flacon ou l'emballage est endommagé.
- Le flacon de Aqualarm™ U.P. contient de petites pièces en plastique pouvant être avalées par de jeunes enfants. Il existe un risque d'étouffement, c'est pourquoi Aqualarm™ U.P. action doit être tenu hors de portée des enfants.
- Aqualarm™ U.P. convient aux lentilles de contact souples et rigides.
- Aqualarm™ U.P. peut être utilisé par des personnes non initiées n'ayant reçu aucune formation spécifique.
- Ce produit n'est pas contre-indiqué aux femmes enceintes, allaitantes, ou aux enfants.
- Si votre enfant souffre de sécheresse oculaire, consultez un médecin avant d'utiliser un lubrifiant pour les yeux.
- * Ce produit contient de l'acide borique. Une évaluation de la sécurité de l'acide borique et du borate de sodium conclut qu'ils ne sont pas nocifs aux concentrations présentes dans ce produit ophtalmique.

Comment conserver Aqualarm™ U.P.?

À conserver à une température comprise entre +1 °C et +25 °C.

Le flacon est conçu de sorte que vous puissiez utiliser Aqualarm™ U.P. pendant 3 mois après ouverture.

Quels conditionnements sont disponibles?


Aqualarm™ U.P. est conditionné en flacon de 10 mL.



Méthode de stérilisation aseptique et conditionné dans un système de barrière stérile unique



Attention : Consultez les instructions d'utilisation pour obtenir des informations importantes telles que des avertissements et des précautions d'emploi.

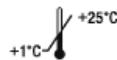

Stockage du dispositif médical à une température comprise entre +1 °C et +25 °C



Date de péremption (AAAA-MM) – ne pas utiliser après la date de péremption



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Numéro de lot



Lire le mode d'emploi



Dispositif Médical



Contient des substances dangereuses (contient de l'acide borique*)



Date de fabrication



Identification unique du Dispositif



Évaluation européenne de la conformité des dispositifs médicaux
Marque CE avec le numéro de l'organisme notifié

GTIN (01) identification du dispositif
EXP (17) date limite d'utilisation (format : aammjj)
LOT (10) numéro de lot



Peut être utilisé pendant 3 mois après la première ouverture

 Fabricant du dispositif médical :
Dr. Gerhard Mann
chem-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173,
13581 Berlin
Allemagne

Information Médicale : +33(0) 4 67 12 30 30



®/™ are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates
© 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates
Aqualarm™ U.P.1932EU-06 2023-05